

吸入サポートアプリケーションのご案内

吸入サポートとは？

「ブデホル®吸入粉末剤「MYL」」を使用される患者さまの服薬支援をおこなうツールです。

● 吸入練習器を使ったトレーニング支援

スマートフォンで、吸入練習器の音をチェックします。

「正しく練習できたか」確認できます。



● 服薬忘れ防止通知、服薬記録の支援

服薬情報の通知登録で、**服薬時間に通知メッセージの表示**をおこなうことができます。

服薬の記録、通院日の登録が可能です。


忘れ防止

18:00になりました。
お薬の吸入時間です。



インストールの方法

● QRコードをカメラで読み取り、ご利用の端末にインストールをお願いします。

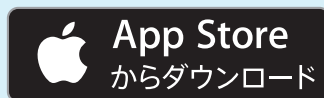

● 対象OSは下記の通り


iOS : 13以上 iOS 12以下では動作確認をおこなっておりません。(iPhone6s以上必要)

Android 6.x以上 Android 5.x以下では動作確認をおこなっておりません。

吸入練習器を使ったトレーニング

吸入サポートを起動し、[吸入トレーニング] を選択します

[吸入トレーニング] を初めて起動したときは、**動画を見る必要**があります。

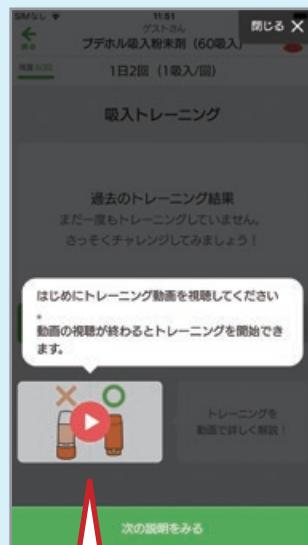

動画を見ないと
[スタート] できません



動画を見たので
[スタート] できます

吸入トレーニングをおこなってみましょう

吸入練習器を準備して、**[トレーニングスタート]** をしてください。

! 30cm~60cm離して練習してください



スマートフォンの画面を見ながら練習すると、姿勢が悪くなるので注意

